



Silberhütchen

zur Anwendung bei wunden Brustwarzen während der Stillzeit



Pflegehinweise und Aufbewahrung

Material

Bei unserem Material handelt es sich zu **100% um reines 999er Silber**. Silber ist ein Naturprodukt und kann nach längerer Zeit farblich anlaufen (natürlicher Prozess), sofern es nicht richtig gelagert und gepflegt wird. Es hat keinerlei Einfluss auf die Wirkung und bestätigt insbesondere die hohe Reinheit unseres verwendeten Materials. Dennoch kann mit der richtigen Pflege und Lagerung den Verfärbungen entgegengewirkt werden, um die Ästhetik des Produktes zu erhalten.

Hinweis!

Die Silberhütchen bitte nach jeder Nutzung mit einer milden Seife und klarem Wasser reinigen. Anschließend bitte ordentlich mit einem Küchentuch trocknen und im mitgelieferten Säckchen aufbewahren. Die Aufbewahrung an der Luft und in Feuchtigkeit erhöhen das Risiko von Verfärbungen (Oxidation) des Silbers.


Sicherheit und Echtheit

Wir lassen unsere Silberhütchen durch akkreditierte Prüflabore, unter anderen dem TÜV Süd, testen.

Dein Produkt ist sicher und enthält keine Fremdmetalle wie z.B. Nickel, Kupfer oder Blei.



Prüfprotokoll
Test record



Chemische Stückanalyse – Record for Chemical Checkanalysis
(Röntgenfluoreszenzanalyse)

Auftrags Nr. – Order No. : 3495530 Datum: 25.08.2021
 Prüfstück Nr. – Sample No. : Livella Silberhütchen Prüfer: M. Becker

Geräte-Nr. – Equipment No. : QS-004 10303

Angaben in Gewichts-Prozenten – Requirement in Weight-Percentage (%)

Probe-Nr. / Sample No.	Proben-Bezeichnung / Identification	Ag	Fe	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Nb	Ti	W	Co	Sn	Pb
1		99,96	0,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		99,94	0,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Interpretation:
 Die untersuchten Livella Silberhütchen weisen einen Silberanteil von über 99,9% auf (99,9% ± 0,3%).
 Interpretation: The analyzed Livella Silver hats have a Silver content above 99,9% (99,9% ± 0,3%).

Prüfung gemäß Methodenbeschreibung QMA-Nr. MUC-WMR-A016:2020

TUV[®]

erteiltigebend: IS-ANZ-MUC
 04/02/21 M. Becker
 ertelQualitätsmanagement/QM_Labor/Prüfprotokolle/7
 04/02/21

Freigegeben H. Beyer
 Rev.-Stand 04/2021

Die Prüfgebühren beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand.
 Gedruckte Exemplare unterliegen keinen Änderungsdiensten!
 Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Seite 1 von 1



Pflege-tipps

Tägliche Reinigung zwischen den Anwendungen

Wir empfehlen, die Silberhütchen zwischen den Anwendungen mit lauwarmem Wasser gründlich abzuspülen. Dazu kann eine milde Seife verwendet werden. Danach mit einem Küchentuch gut abtrocknen. **Ein regelmäßiges Abspülen beugt Verfärbungen vor.**

💧 **Hilfsmittel** Wasser, milde Seife, Küchentuch

🕒 **Dauer** ca. 1 min

Nach längerer Nutzung, um Verfärbungen entgegenzuwirken

Natron-Wasser-Mixtur

Die Silberhütchen können mit einer Mixtur aus Natron (Backpulver) und Wasser gereinigt werden. Dazu das Natron (ca. 2-3 Esslöffel) in einer kleinen Schüssel mit etwas Wasser anrühren, bis eine leicht flüssige Mixtur entsteht. Anschließend die Mixtur mit Hilfe einer kleinen sanften Bürste auf die Silberhütchen auftragen und es bürsten. Das Silber sollte sich nun nach und nach aufhellen. Im letzten Schritt die Silberhütchen mit reichlich klarem Wasser und einer milden Seife gründlich reinigen und gut abtrocknen.

💧 **Hilfsmittel** Natron (Backpulver), (Zahn-)Bürste oder Schwamm, Schüssel, Wasser

🕒 **Dauer** ca. 5 min

Natron-Salz-Bad

Zuerst eine Schüssel komplett mit Alufolie auslegen. Dann heißes, nicht kochendes Wasser in die Schüssel schütten. 1 EL Natron und 1 EL Salz in das heiße Wasser geben. Nun die Silberhütchen für 1-2 Minuten in das Natron-Salz-Gemisch legen. **Wichtig! Nicht länger als 2 Minuten im Gemisch einweichen lassen.** Die Silberhütchen herausholen und gründlich mit klarem Wasser abwaschen. Nur noch mit einem Küchentuch gut abtrocknen.

💧 **Hilfsmittel** 1 EL Natron, 1 EL Salz, Alufolie, Schüssel, heißes Wasser

🕒 **Dauer** ca. 5 min



Weiße Zahnpasta

Alternativ können die Silberhütchen auch mit einer handelsüblichen weißen Zahnpasta aufpoliert werden. Dafür die Silberhütchen mit Zahnpasta einstreichen und mit einer Zahnbürste bürsten. Die Paste dann für ca. 10 Minuten einwirken lassen und anschließend mit der Zahnbürste und klarem Wasser abbürsten. Zum Schluss dann nochmal gründlich mit klarem Wasser reinigen und mit einem Küchentuch gut abtrocknen.

💧 **Hilfsmittel** Zahnpasta, Zahnbürste, Wasser und Küchentuch

🕒 **Dauer** ca. 15min

Aufbewahrung der Silberhütchen

Die Silberhütchen sollten immer in dem mitgelieferten Säckchen aufbewahrt werden.

Die Aufbewahrung an der Luft und in Feuchtigkeit erhöhen das Risiko von Verfärbungen des Silbers.

Vielen Dank
für dein Vertrauen



Wir von Livella wünschen dir
eine liebevolle Stillzeit.